



## EASY SAMPLER –ULOSTENÄYTTEEN KERÄÄJÄ

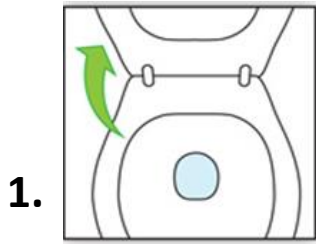


**1. Nosta wc-istuinlaidat ylös ja tarvittaessa kuivaa kaakelipinta.**

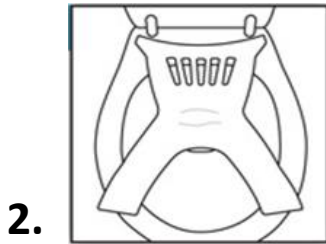

**2. Avaa pakkaus ja kiinnitä kerääjä paperissa olevilla kiinnitystarroilla kuvan osoittamalla tavalla.**



**3. Tarkista, ettei kerääjä kosketa vettä.**

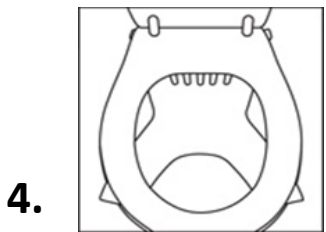

**4. Laske istuinosa paikoilleen.**



**5. Ota näyte näytteenottolusikalla, laita lusikka näytepurkkiin ja sulje se.**



**6. Nosta istuinosa ja vapauta kerääjä wc-pönttöön.**



**7. Hävitä kerääjä wc-huuhtelun mukana. Tarvittaessa toista huuhtelu.**

**Voit palauttaa näytteen saamassasi pakkauspussissa.**